



U-Albumina

Reg.MS. 80954880086


O ECO F U-Albumina é um imunoenensaio fluorescente para medição quantitativa de albumina em amostras de urina humana. Este teste destina-se a auxiliar na previsão de nefropatia diabética e doenças cardiovasculares (DCV).

Especificações do Produto


ECO F U-Albumina	
Uso pretendido	Medição quantitativa de microalbumina
Tipo de amostra	Urina
Volume de amostra	3µL
Faixa de medição	5 - 250 mg/L
Faixa de referência	< 20 mg/L (Normal) 20 - 200 mg/L (Microalbuminúria) > 200 mg/L (Macroalbuminúria ou proteinúria)
Tempo do teste	5 minutos
Condições de Armazenamento	2-30°C

Procedimento do Teste

Leitura após 5 minutos

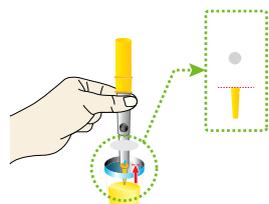

Coletar 3µL de amostra com a pipeta spoit (amarela).

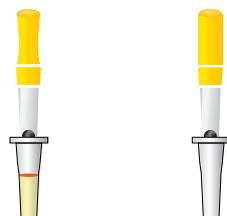


Misturar a amostra, a esfera fluorescente e o tampão de extração delicadamente ao pressionar e liberar a borracha na parte superior da pipeta spoit (amarela) por 6-8 vezes.



Aplicar a mistura de reação no poço da amostra do dispositivo teste e pressionar o botão start imediatamente.

Estudo comparativo

Gráfico de Regressão Linear

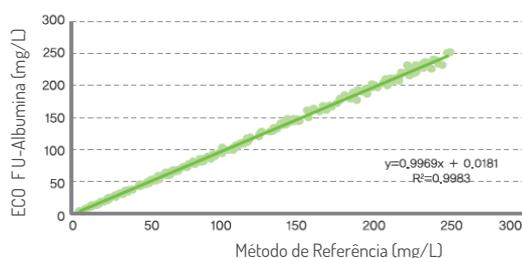

Método de Referência vs ECO F U-Albumina

Correlação ECO F U-Albumina vs Imunoturbidimetria	$y=0,9969x - 0,0051$; $R^2=0,9983$ $n=210$
CV%	< 7%
Difer (%)	Dentro de 10%

Categoria	Produto	Apresentação
Marcador Cardíaco	ECO F U-Albumina	20 Testes
	ECO F U-Albumina	10 Testes