

D-Dímero

Reg. MS. 80954880076



ECO F D-Dímero é um imunoenensaio fluorescente para a medição quantitativa do nível de D-Dímero em amostras de plasma e sangue total. O teste é realizado para ajudar a excluir a possibilidade de Trombose Venosa Profunda (TVP), Embolia Pulmonar (EP) e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Especificações do Produto

ECO F D-Dímero	
Uso pretendido	Medição quantitativa de D-Dímero para descartar a presença de coágulo sanguíneo inadequado (trombo)
Tipo de amostra	Sangue total venoso (citrato), sangue total capilar e plasma (citrato)
Volume de amostra	10µl
Faixa de medição	25 - 5.000ng/mL FEU (50 - 10.000ng/mL)
Faixa de referência	≤500 ng/mL FEU
Tempo do teste	7 minutos
Condições de Armazenamento	2-30°C

Procedimento do Teste

Leitura após 7 minutos



Coletar 10µl de amostra com a pipeta plástica descartável (10µl).

Dispensar a amostra coletada no tubo com tampão de extração. Em seguida, descartar a pipeta plástica (10µl) usada.

Usando a pipeta descartável 100µl, misturar a amostra e o tampão de extração 2 - 3 vezes e pipetar 100µl da mistura de reação.

Aplicar a mistura de reação no poço da amostra do dispositivo teste e pressionar o botão start imediatamente.

Estudo comparativo

Gráfico de Regressão Linear



Método de Referência vs ECO F D-Dímero

Correlação ECO F D-Dímero vs Stago	$Y = 1.0062x + 17.742$; $r=0.9920$; $n=120$
CV%	QCL=6.8% / QCM=7.5% / QCH = 8.8%
Difer (%)	Dentro de 15%

Categoria	Produto	Apresentação
Marcador Cardíaco	ECO F D-Dímero	20 Testes
	ECO F D-Dímero	10 Testes